


# Check One DIGITAL

チェックワン®デジタル デジタル表示の妊娠検査薬

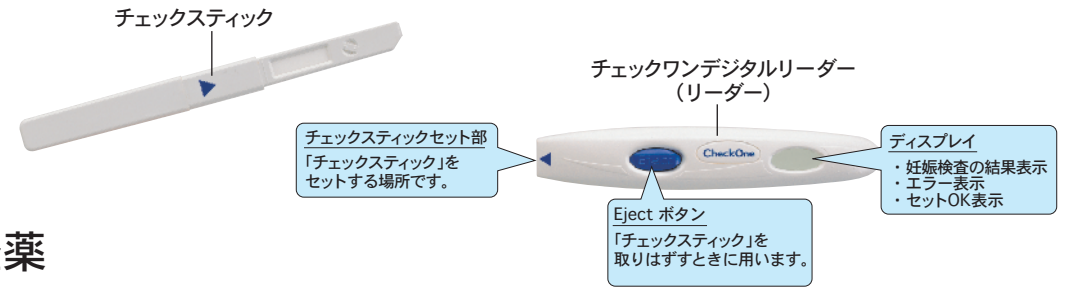

## 【検査のしかた】 検査は下記の手順に従って正しく行ってください

★ チェックワンデジタルは、検査直前に「チェックスティック」を「リーダー」にセットして使います。

・「チェックスティック」は、必ず同じ箱に入っている「リーダー」とともに使用してください。  
 ・他の箱の「チェックスティック」は使用できません。  
 \* この「リーダー」で使用できる「チェックスティック」の詰め替え品(レフィル)は販売していません。

**1 検査の準備** 図1

朝・昼・夜いつの尿でも検査可能です。

★検査直前にアルミ袋から「チェックスティック」を取り出し、キャップをはずしてください。

**2 検査キットの組み立て** 図2

★「チェックスティック」と「リーダー」上の青色の三角矢印をさがします。青色の三角矢印を一直線上に並べます。

★「チェックスティック」を「リーダー」に「カチッ」と音がするところまでセットします。「セットOK表示」を確認したらすぐに検査します。

\*「セットOK表示」が表示されるまで、検査しないでください。  
 \*「セットOK表示」が表示されない場合は、Eject ボタンを押して「チェックスティック」を取り出し、もう一度セットし直してください。それでもまだ「セットOK表示」が表示されない場合は、<エラー表示一覧>【D】をご覧ください。  
 \*セット完了後は、検査結果が表示されるまで Eject ボタンを押さないでください。(エラー表示があらわれた場合を除く)

**3 検査する** 図3

5~7 秒間

尿をかける

尿吸収体

★「リーダー」を下に向け、「チェックスティック」の尿吸収体全体に直接尿を5~7秒間かけてください。

・このとき、「リーダー」を濡らさないように気をつけてください。

又は

15 秒間

尿につける

尿吸収体

★紙コップ等を使用する場合は乾いた清潔なものを使い、尿吸収体全体が浸るように15秒間尿につけてください。

4

## 待つ(検査中)

図4



★かけ終わったらキャップをして尿吸収体を下に向けて持つか、水平なところに置いてください。20~30秒後に「セットOK表示」が点減し始め、「検査中」であることを知らせます。

\*+、-の結果が表示されるまで Eject ボタンを押さないでください。

\*「セットOK表示」が点減しなかった場合は、<エラー表示一覧>【B】をご覧ください。

5

## 結果をみる

★1~3分でディスプレイに判定結果が表示されます。

\*判定結果は1時間ディスプレイ表示されます。

\*結果が表示されたらEject ボタンを押して、「チェックスティック」を取りはずしていただいてもかまいません。

## &lt;続けて再検査をするには&gt;

- 「リーダー」のディスプレイに結果が表示されている、またはエラー表示が表示されているときは続けて検査できません。
- 判定結果は1時間、エラー表示は30分間表示されます。
- 続けて再検査をする前に、多量の水分を摂らないでください。
- デジタル表示がすべて消えて「リーダー」が使えるようになったら、新しい「チェックスティック」を使って、もう一度【検査のしかた】②検査の準備から操作を行ってください。

## 【判定のしかた】ディスプレイの表示を見て判定してください

⊕ が表示された場合

図5-1

陽性



妊娠反応が認められました。

妊娠している可能性があります。できるだけ早く医師の診断を受けてください。

⊖ が表示された場合

図5-2

陰性




今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。

しかし、その後生理が始まらない場合は、再検査をするか、または医師に相談してください。

## &lt;エラー表示一覧&gt;




「チェックスティック」をはずすのが早すぎたことが考えられます。すぐに「チェックスティック」を「リーダー」にセットし直してください。再度失敗するとエラー表示【B】があらわれます。

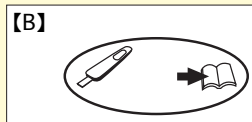

検査が正しく行われていないことをあらわしています。


次の原因が考えられます。

・「チェックスティック」を「リーダー」に確実にセットする前に尿をかけてしまったため  
 ・尿をかけ終わった後に尿吸収体を下に向けて持たなかったか、水平に置かなかったため  
 ・尿のかけすぎか尿量不足のため  
 ・「チェックスティック」をはずすのが早すぎたため  
 このエラー表示は30分間表示されます。同じ箱内に未使用の「チェックスティック」がありましたら、説明書に従い検査をやり直してください。<続けて再検査をするには>をご覧ください。

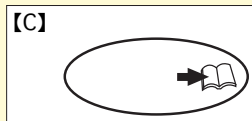

「リーダー」にエラーが発生しています。

同じ箱内に未使用の「チェックスティック」があってもこの「リーダー」は使用しないでください。  
 アラクスチェックワン相談室までお問い合わせください。

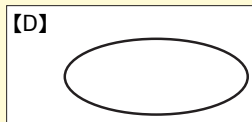

ディスプレイに何も表示があらわれない場合

まだ尿をかける前でしたらもう一度「チェックスティック」をはずして【検査のしかた】②検査キットの組み立てから始めてください。それでもディスプレイに表示があらわれない場合は、アラクスチェックワン相談室までお問い合わせください。

- 判定結果は1時間ディスプレイに表示されます。
- 結果が表示されたら、Eject ボタンを押して「チェックスティック」を取りはずしていただいてもかまいません。
- 「リーダー」のディスプレイにあらわれた表示を見て判定し、「チェックスティック」にあらわれた線で判定しないでください。
- 使用済みの「チェックスティック」を再度差し込まないでください。
- エラー表示が表示されている場合は、<エラー表示一覧>をご覧ください。

## チェックワンデジタルの検査に関するお問い合わせ

アラクス チェックワン相談室 TEL 052(951)2503  
 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26  
 受付:9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

**ARAX** 株式会社 アラクス  
 〒460-0002  
 名古屋市中区丸の内三丁目2-26