

生理予定日当日から検査ができる
チェックワンファスト

CheckOne FAST

●生理予定日当日から検査可能 ●判定結果がのこる ●わずか1分で判定 ●99%以上の正確さ ●朝・昼・夜いつの尿でも検査可能

検査のしかた 朝・昼・夜いつの尿でも検査可能です。

1

3秒

尿吸収体**全体**に尿をかける

2

下に向けたままキャップをする

3

手に持って待たない!


水平に置く

約1分待つ

キャップをはずして、尿吸収体が下に向くように持ち、尿吸収体全体を約3秒間尿で濡らしてください。
紙コップ等を使用する場合は乾いた清潔なものを用い、尿吸収体全体が浸るように5秒間、尿につけてください。

濡らし終わったら、下に向けたままキャップをします。

平らなところに**判定窓**が見えるように置き、そのまま約1分待ちます。

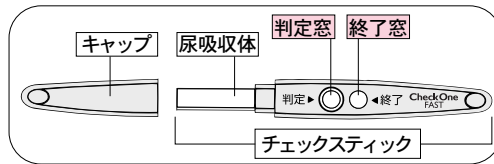

判定のしかた

チェックスティックの**終了窓**に赤紫色の縦ラインがあらわれていることを確認してください。判定は**判定窓**にあらわれる赤紫色の縦ラインの有無を観察して行います。

●実際にあらわれるラインの色・形は例示と異なる場合があります。

判定窓に赤紫色の縦ラインがあらわれた場合

陽性

判定窓に赤紫色のラインがある

薄くても判定窓に縦ラインがあらわれたら陽性です

判定窓に赤紫色の縦ラインがあらわれなかった場合

陰性

判定窓に赤紫色のラインがない

陽性(妊娠)

妊娠反応が認められました。
妊娠している可能性があります。できるだけ早く医師の診断を受けてください。

陰性(非妊娠)

今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。
しかし、その後生理が始まらない場合は、再検査をしてください。

【判定に関する注意】


- 判定は**判定窓**を観察して行ってください。
- 判定の際は、次のことに注意してください。
- ①**終了窓**に赤紫色の縦ラインがあらわれる前に判定しないでください。
- ②薄くても**判定窓**に赤紫色の縦ラインがあらわれた場合は陽性です。
- ③一時的に**判定窓**に(スティックに平行な)横ラインがあらわれることがありますが、これは赤紫色の試薬が流れている検査の途中であり、判定には関係ありません。時間がたてば次第に横ラインは見えなくなります。陽性ラインは**判定窓**に、(スティックに垂直な)縦ラインとしてあらわれます。
- ④尿のかけ具合によっては、多少時間のかかることがあります。もし、尿をかけてから10分たっても**終了窓**に赤紫色の縦ラインがあらわれない場合には操作ミス(尿量不足など)が考えられますから、別のチェックスティックで検査をやり直してください。

【Testing Period】

You can use Check One FAST Pregnancy Test at any time of the day, from the day you expect your period to start.

【Instructions for the Proper Use】

- ① Urinate thoroughly on the absorbent tip. (For about 3 seconds)
 - ② Cover the tip with the cap, keeping it downward direction.
 - ③ Keep the kit horizontal. (Do not hold it by your hand!)
- Wait for about 1 minute!

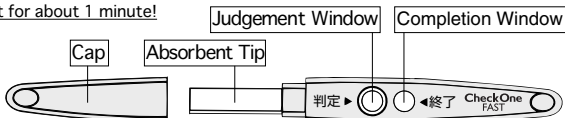

【Judgement】

Positive: Reddish purple line in the judgement window (**判定**), even if the line is faint.

Pregnant
You are supposed to be pregnant. Please consult a doctor as soon as possible.

Negative: No reddish purple line in the judgement window (**判定**)

Not Pregnant
If you find no color line in the judgement window, you are not supposed to be pregnant this time.
If you have no menstruation afterward, please re-test or consult a doctor.

※Please note that real color or profile of the lines appeared sometimes differs.